

WC52 Kontrollenhet og Hot Dog Varmedekken

Oppstartprosedyre

1. Koble kontakten til 230V og trykk på «ON» knappen på baksiden for å starte opp WC52.

De gule inngangene kan stilles mellom 43-36 C, mens den blå kan stilles fra 39 -35 C.

2. Koble til Underdekken U101 (U102) eller U300 (WaffleGrip) til blå utgang.

Koble til øvrige varmedekken (B104, B105, B110.e.a.) til gul utgang.

Se til at det røde punktet er i linje med rødt punkt (A eller B).

Koble fra ved å trekke i metalldelen (ikke vri).

3. Still ønsket temperatur ved å trykke på knappen under display.

Se til at portene A og B stilles til ønsket temperatur i henhold til plassering av varmedekken på pasient.

Ved «Prewarming» eller PreOp varming kan B104 benyttes og eventuelt ved oppstart skiftes til B105 Multi-posisjons varmedekken.

I tillegg kan B107 Hode Varmedekken benyttes på kanal B.

4. Husk alltid at Sensor er plassert i kontakt med pasient.

Legg alltid et laken i mellom pasient og varmedekken.

Ikke legg den svarte siden mot svart side.

Fiolett side er utsiden og **svart** vender alltid inn mot pasient.

Kort feilsøking:

Kontroller at strøm er tilkoblet. Unngå ved oppstart at overdekken (A og B) og underdekken ligger mot hverandre uten noe imellom. Da kan lett alarmen slå seg på for overoppheting.

Alarmkode E1 - overoppheting ie. 1grad over innstilt.

Alarmkode E2 - Hot Dog oppnår ikke innstilt temperatur innen 10 minutter. Sjekk at sensor er i kontakt med pasient.

Alarmkode E3 - elektrisk avvik til varmedekken.

Restart WC52 og hvis alarmen kommer på igjen, skift ut og velg et annet varmedekken.

Figur til høyre: B107 Hode varmedekken

Figur over: B105 Multi posisjonsdekken

